



Эффективность, удобство и контроль

Металлические самолигирующие
брекеты Smartclip

Дизайн, созданный для эффективности и удобства лечения.

Третье поколение самолигирующихся брекетов SmartClip демонстрирует **отличный контроль ротаций и комфорт для пациентов**. Благодаря нитиновой клипсе, брекеты SmartClip обеспечивают **легкое введение и извлечение дуги** с меньшими усилиями. Это ли не повод для улыбки?

Откройте новые возможности лечения. Пациентам понравятся **гладкие и удобные низкопрофильные самолигирующиеся брекеты**. Ортодонты оценят классический дизайн брекетов с выраженными крыльями, **ромбовидную форму**, обеспечивающую надежную фиксацию, а **пассивное положение дуги** – эффективность и сокращение времени лечения.

Данные брекеты созданы для **удобства гигиены полости рта**, открытый слот обеспечивает легкое очищение, помогает снизить проблемы образования налета, которые свойственны для лигатурных брекетов. Торк в базе облегчает завершающие этапы лечения, а **выраженные крылья брекетов** обеспечивают возможность применения различных методик лечения.

Интеллектуальная клипса, эффективное лечение.

Ортодонты рассказывают о применении самолигирующихся брекетов SmartClip третьего поколения:

Сокращение времени лечения

81%

пациентов предпочли бы сократить время лечения на брекетах

Значительные клинические улучшения

70%

респондентов отметили значительные клинические улучшения

Снижение количества визитов к ортодонт

62%

пациентов пожелали сократить количество визитов к ортодонт на три и более

Сокращение времени лечения

57%

пациентов были бы рады сократить длительность лечения на три и более месяца

Увеличение интервалов между приемами

68%

ортодонтов готовы к тому, чтобы увеличить интервалы между визитами одного пациента

Уменьшение времени пребывания пациента в кресле

79%

докторов снизили время пребывания пациентов в кресле во время приема

Брекеты SmartClip повысят эффективность вашей практики!



Щечные трубки SmartClip SL3

Щечные трубки SmartClip SL3 доступны для создания наборов 6x6. Они имеют низкий профиль, лигатурные крылья для обеспечения гибкости лечения, а дизайн обеспечивает легкое лигирование стальной лигатурой для применения техник “laceback” и “tie-back”, а также эластичных лигатурных модулей. Щечная трубка верхнечелюстного первого моляра имеет дистальный оффсет в базе брекета, облегчая введение дуги в процессе лечения.

Тандемные дуги

Техника использования тандемных дуг является важной и может быть использована на начальном этапе лечения с применением самолигирующихся брекетов SmartClip. Следом за начальной дугой (обычно .014 Nitinol SE), когда она стала полностью пассивной, вторую дугу устанавливают непосредственно поверх первой, образуя тандемные дуги. Комбинация этих двух круглых дуг обеспечивает максимальный контроль вертикальных, горизонтальных и ротационных отклонений зубов. Использование тандемных дуг также обеспечивает более легкое последующее введение граненых дуг.



Брекеты, которые оцените вы и ваши пациенты.

Принимайте больше пациентов, сократив время приема. Третье поколение брекетов SmartClip повышают вашу эффективность, снижая время на прием одного пациента. Ваши пациенты будут довольны!

Новый подход к фиксации брекетов.

Попробуйте **брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free** и почувствуйте разницу!

- Отсутствие этапа нанесения адгезива на брекет (экономия времени на установку брекетов)
- Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга
- Защита эмали зубов пациентов на протяжении всего лечения
- Легкое снятие брекетов и удаление остатков адгезива

Традиционная форма

- Привычная форма брекета с выраженными лигатурными крыльями
- Идентификационная цветовая метка
- Доступны щечные трубки с нитиноловой клипсой SmartClip

Дизайн

- Скругленная поверхность брекета для повышенного комфорта пациента
- Низкопрофильные самолигирующиеся брекет

Интеллектуальная клипса

- Способствует легкому введению и извлечению дуг
- Запрограммированная функция извлечения дуги в случае повышенной нагрузки на зуб
- Открытый дизайн для облегчения гигиены полости рта

Позиционирование

- Вертикальная разметочная линия для облегчения позиционирования по вертикальной оси зуба

Фиксация

- Доступны с преднанесенным адгезивом (APC Flash-Free)
- Микропротравленное основание анатомической формы для надежного прилегания к поверхности зуба

Помогите вашим пациентам получить красивые и здоровые улыбки с необходимой производительностью, предсказуемыми результатами и комфортом. Выбирайте привычную вам пропись брекетов SmartClip – MBT или Ricketts* (High Torque), или Roth* (Low Torque).

*Версии прописей компании 3M

Доступны с

APC™ Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом



SMARTCLIP™ | SL3

SELF-LIGATING APPLIANCE SYSTEM

Производительность, опыт и совершенствование практик по всему миру.
Уже более десятилетия самолигирующие брекеты SmartClip успешно
помогают ортодонтам создавать красивые здоровые улыбки!



**Уполномоченный представитель
на территории РФ АО «3М Россия»**

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный центр Comcity
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru

3М, логотип 3М являются зарегистрированными
знаками компании «3М Компани». Авторские права
на фотографии, содержание и стиль любой печатной
продукции принадлежат компании «3М Компани».

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Для распространения на мероприятиях для медицинских
работников.
3М 2020. Все права защищены.